






Provette COPAN per esami Microbiologici

Tipologia delle provette codice e modalità	Esami eseguibili	Provetta
<p>Provette tappo rosa E-SWAB AUTOMATION REGULAR FLOCKED</p> <p>Inviare entro <u>due ore</u> in Microbiologia se non possibile conservare a temperatura ambiente al massimo per 48 ore dal prelievo</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tampone faringeo ▪ Tampone auricolare ▪ Tampone cervico vaginale e vulvare ▪ Tamponi vari ▪ Pus ▪ Tamponi da ferita ▪ Tamponi cutanei ▪ Tamponi di sorveglianza 	<p>Codice 490CE.AM</p> 
<p>Provette tappo arancio E-SWAB AUTOMATION MINITIP FLOCKED</p> <p>Inviare entro <u>due ore</u> in Microbiologia se non possibile conservare a temperatura ambiente al massimo per 48 ore dal prelievo</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tampone congiuntivale ▪ Tampone nasale ▪ Tampone inserzione catetere per emocolture quantitative (Nefrologia) ▪ Tamponi vari della Patologia Neonatale e Pediatria 	<p>Codice 491CE.AM</p> 
<p>Provette tappo verde (feci) FECAL-SWAB AUTOMATION FLOCKED</p> <p>Inviare entro <u>due ore</u> in Microbiologia se non possibile conservare a 4°-8° C al massimo per 48 ore dal prelievo</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Coprocoltura ▪ Ricerca Salmonella ▪ Ricerca Yersinia ▪ Ricerca Vibrio colerae ▪ Ricerca E.coli enteropatogena (VTEC) ▪ Rotavirus ▪ Norovirus 	<p>Codice 470CE.AM</p> 

<p>Provette tappo azzurro THB/LIM BROTH AUTOMATION</p> <p>Inviare entro <u>due ore</u> in Microbiologia se non possibile conservare a temperatura ambiente al massimo per <u>24 ore</u> dal prelievo</p>	<ul style="list-style-type: none"> Tampone vagino/rettale per ricerca di Streptococco di gruppo B (Streptococcus agalactiae) 	<p>Codice 476CE01.AM</p> 
<p>Provetta tappo rosso (regolare)</p> <p>Inviare entro <u>due ore</u> in Microbiologia se non possibile conservare a 4°-8° C al massimo per 48 ore dal prelievo</p>	<ul style="list-style-type: none"> Ricerca Chlamydia trachomatis da tampone cervico-vaginale 	<p>Codice C346UT-MRT regular</p> 
<p>Provetta tappo rosso (sottile) Per tampone uretrale</p> <p>Inviare entro <u>due ore</u> in Microbiologia se non possibile conservare a 4°-8° C al massimo per 48 ore dal prelievo</p>	<ul style="list-style-type: none"> Ricerca Chlamydia trachomatis da tampone uretrale 	<p>Codice C307C-UTM RT mini</p> 